



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО - РЕКЛАЙНЕР



Руководство пользователя

SYNERGY

F3005

версия 1.2022 FMZ
(ПОСТАВКА КРЕСЛА В РАЗБОРЕ)



Массажное кресло-реклайнер F3005

Благодарим Вас за покупку массажного кресла FUJIMO Synergy.
Прежде чем использовать кресло, пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство по правильному применению
и эксплуатации.

Сохраните это руководство для будущего обращения к нему
в случае возникновения вопросов.

SYNERGY

Руководство_пользователя

Меры безопасности	2 - 4
Составные части	5
Порядок сборки	6 - 8
Пульт управления	9
Порядок эксплуатации	10- 12
Устранение проблем	13
Хранение и обслуживание	14
Ограничение гарантии	15 - 16
Спецификация	17



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании массажного кресла необходимо соблюдать следующие меры безопасности, приведенные ниже:

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ перед началом использования.

Внимание! Для снижения риска получения ожогов, возгорания, поражения электрическим током или травм:

1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, если на него попала вода. Сразу отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ оставляйте включенное кресло без присмотра. Отключите его от сети, если оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется людьми с ограниченными способностями или детьми.
7. Используйте кресло только по прямому назначению, как описано в руководстве. Не используйте дополнительные опции, не рекомендованные производителем.
8. НЕ используйте булавки или крепежные детали с креслом.
9. НЕ используйте кресло во время сна и не засыпайте в кресле.
10. НЕ роняйте кресло, не помещайте внутрь чужие предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией аэрозоля или с низким содержанием кислорода.
12. НЕ перемещайте кресло, держась за сетевой шнур.
13. Кресло запрещено использовать детьми без присмотра.
14. НЕ допускайте зажима проводов или попадания их в движущие части, что может привести к поломке.
15. Перед использованием проверьте состояние тканевого покрытия спинки и убедитесь что оно не разорвано. Если Вы обнаружите повреждение, прекратите использование кресла, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
16. Не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или вилка питания, если оно неисправно, после падения или попадания на него воды. Срочно обратитесь в сервисный центр.
17. Массажное кресло не предназначено для коммерческого использования. Это приведет к аннулированию гарантии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


ВНИМАНИЕ! Внимательно прочитайте все указания по безопасности перед началом эксплуатации кресла:

1. Люди с указанными ниже недугами, должны проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:
 - а) при наличии злокачественной опухоли
 - б) при болезнях сердца
 - в) при беременности
 - г) при заболеваниях, требующих покоя
 - д) при болезнях спины или травмах спины в прошлом
2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими имплантатами должны проконсультироваться с врачом перед применением кресла.
3. Не используйте массаж более 15 минут одновременно.
4. Непрерывное использование массажа может привести к перегреву и сокращению срока службы кресла. Если это произошло, выключите кресло и дайте ему остыть.
5. Никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных местах или при кожных раздражениях.
6. Кресло не является профессиональным оборудованием и обеспечивает только расслабляющий массаж. Не используйте его в качестве замены медицинской помощи.
7. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие возможности в работе с элементами управления.
8. Запрещено использование кресла людьми, имеющими физиологические заболевания, ограничивающие ощущения массажа в любой части тела.
9. При обнаружении неисправности кресла, немедленно выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
10. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает обычный звук выполнения массажа.
11. При раскачивании массажного кресла следите за тем, чтобы сетевой провод питания не был поврежден или зажат полозьями кресла. Иначе, это может привести к неисправности и выходу кресла из строя.
12. Избегайте контакта кресла с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть его поверхность.
13. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.
14. Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
15. Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

16. Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
17. Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу только легкое усилие.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

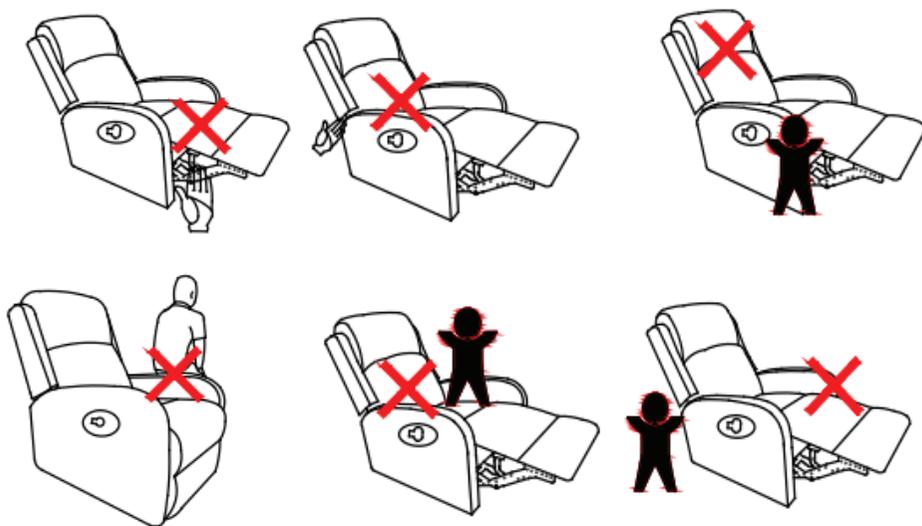

- Не садитесь на подлокотники кресла.
- Держите руки и ноги подальше от механизма подставки для ног и любых зазоров кресла.
- Всегда оставляйте кресло в вертикальном и закрытом положении после использования.
- Не позволяйте детям играть на кресле с откидной спинкой.


СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Составные части массажного кресла



ПОРЯДОК СБОРКИ _____

Комплектация массажного кресла

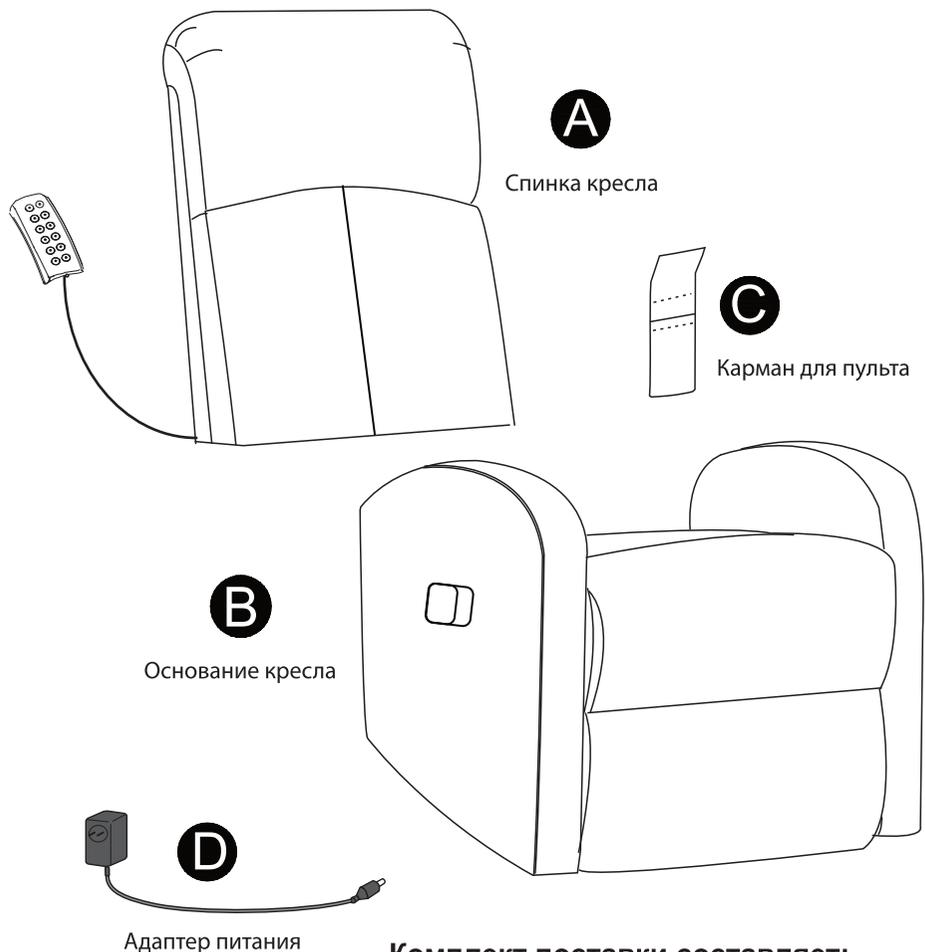


Комплект поставки составляет:

- A - Спинка кресла с пультом управления
- B - Основание кресла
- C - Карман для пульта управления
- D - Адаптер питания


ПОРЯДОК СБОРКИ

Схема сборки

A Освободите части кресла от упаковки

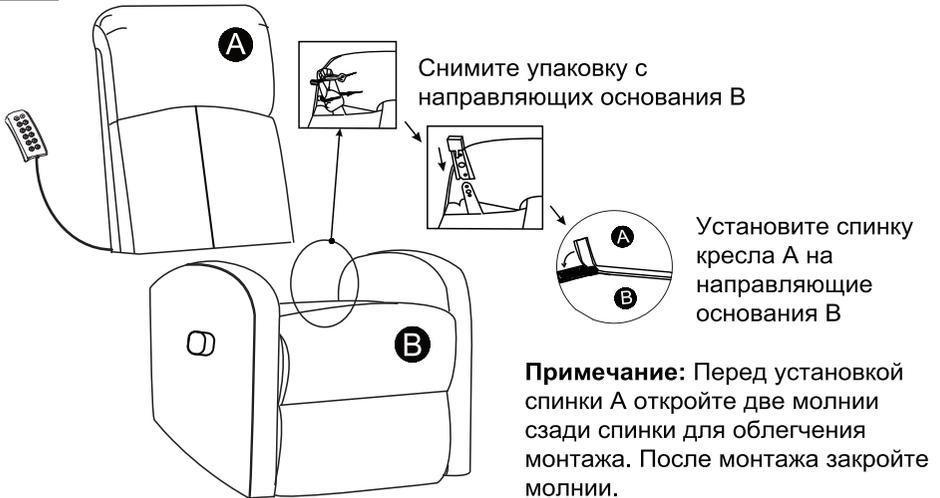

B Соедините разъемы сзади кресла

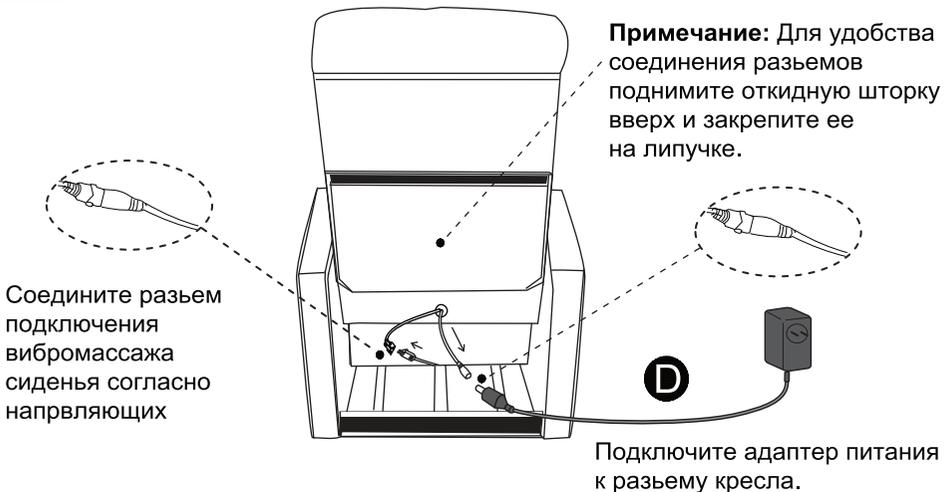

ПОРЯДОК СБОРКИ

Схема сборки




C

Закрепите карман для пульта

Закрепите карман пульта на правом подлокотнике при помощи липучки



Карман для пульта

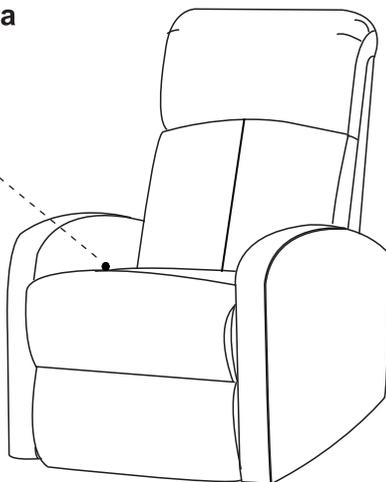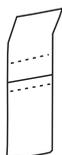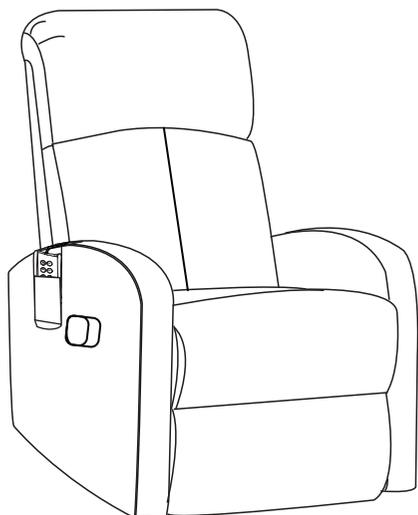**D**

Разместите пульт управления в кармане на правом подлокотнике

ВАШЕ КРЕСЛО ГОТОВО!

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Назначение кнопок управления



ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для полноценного массажа плотно прижмитесь к спинке кресла. Это позволит получить полноценный контакт с массажными роликами. Управление режимами массажа осуществляется с помощью кнопок пульта управления, расположенного в правом боковом кармане.

Назначение кнопок управления массажем



ВКЛ / ВЫКЛ

Нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ для запуска или остановки кресла.

TIMER

TIMER (Таймер 5 / 10 / 15)

Нажмите кнопку TIMER для изменения времени массажа в интервале 5 / 10 / 15 минут.

DEMO

DEMO (Демонстрационный режим)

Нажмите кнопку DEMO для демонстрации всех режимов массажа.

VIBRATION

VIBRATION (Вибрационный массаж сиденья)

Нажмите эту кнопку для активации вибрации в области сиденья. Доступно 3 уровня вибрации: Сильный / Средний / Слабый.

HEAT

HEAT (Нагрев)

Нажмите кнопку для активации нагрева массажных роликов.

SPOT

SPOT (Точечный массаж)

Нажмите кнопку для активации массажа в выбранной точке.



Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ перемещают выбранную точку.

FULL

FULL (Массаж всего тела)

Нажмите эту кнопку для активации массажа всей спины.

BACK

BACK (Массаж нижней части спины)

Нажмите эту кнопку для активации массажа низа спины.

NECK

NECK (Массаж шеи)

Нажмите эту кнопку для активации массажа шеи.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сеанс массажа длится по умолчанию 15 минут. По желанию можно также установить таймер на 5 и 10 минут. После окончания времени массажа кресло выключается и ролики автоматически возвращаются в исходное положение. Если Вы хотите продолжить массаж, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ повторно и выберите функцию массажа.

После завершения сеанса отключите адаптер питания из розетки и храните его в сухом и темном месте. Пульт управления разместите в боковом кармане сиденья массажного кресла.

ВНИМАНИЕ! Роликовый массажный механизм всегда останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это положение после окончания или остановки массажа. Если питание кресла было прервано во время выполнения массажа, то после возобновления подачи питания, массажные ролики автоматически переместятся в крайнее нижнее положение.

Для предотвращения перегрева кресле используется автоматический таймер, отключающий массаж через 15 минут после начала сеанса. Не допускайте длительной работы массажного механизма более 30 минут одновременно.

ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ


Порядок раскладывания и складывания кресла

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенное ниже руководство по правильному использованию кресла реклайнера.

Это кресло имеет функцию откидывания спинки назад с одновременным подъемом подставки для ног вверх. Пожалуйста, следите за детьми, когда они используют разложенное кресло.


Чтобы перевести кресло в положение лежа:

- Отклоните ручку раскладывания на внешней стороне правого подлокотника.
- Используйте вес своего тела и надавите на спинку кресла, чтобы перевести его в разложенное положение.

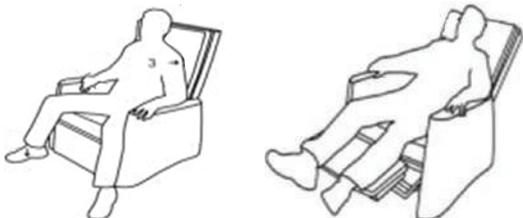

Чтобы вернуть кресло в вертикальное положение:

- Слегка наклоните вес своего тела вперед и вверх.
- Спинка сиденья поднимется в вертикальное положение.
- Используйте ноги, чтобы опустить подставку для ног вниз.

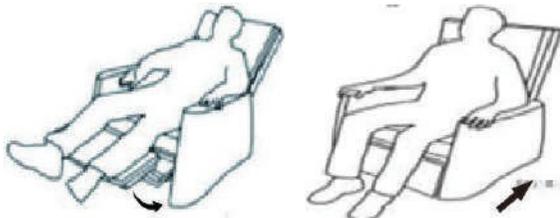

Кресло автоматически блокируется, когда оно находится в полностью вертикальном положении. При необходимости, используйте руки, чтобы помочь поднять / разложить спинку.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Это массажное кресло имеет микропроцессорное управление, которое восприимчиво к скачкам напряжения от +10 % и выше и от -15 % и ниже. Возможные проблемы в работе массажного кресла и способы их устранения представлены в таблице:

Проблема	Причины	Решения
Кресло не работает	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нет питания в сети 2. Отключен адаптер питания 3. Кнопка питания ВКЛ/ВЫКЛ не нажата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кресло после подачи питания 2. Подключите адаптер питания к креслу 3. Нажмите кнопку питания ВКЛ/ВЫКЛ
После нажатия кнопки ПРОГРЕВ массаж не включается	<ol style="list-style-type: none"> 1. Кнопка выбора массажа не нажата 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку выбора массажа для начала сеанса
Не работает вибрация сиденья	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не включена кнопка Вибрация. 2. Адаптер питания не подключен к сети 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите кнопку Вибрация 2. Подключите адаптер питания к сети

Если описанные выше рекомендации не помогли решить возникшую проблему, пожалуйста отключите массажное кресло от питания и попробуйте его включить через 30 минут. При невозможности устранить неисправность, пожалуйста обратитесь к Поставщику или его дилеру.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку или накройте сверху чехлом. Разместите кресло в безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые могут порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

- Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его очистки.
- Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему остыть перед очисткой.
- Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
- Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей на электрические части массажного кресла.
- Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности кресла.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное кресло.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки строго следуя инструкции.
- Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на роликовый массажный механизм при изменении положения тела сидя в кресле.
- Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части тела на движущийся роликовый механизм.
- Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу только легкое усилие.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

1. Гарантийные обязательства не подлежат передаче.
2. Данная гарантия действует только если массажное кресло приобретено у компании Релакса Стар или ее авторизованного дилера.
3. Доказательством покупки является кассовый чек (квитанция), которые обязательны к предъявлению для гарантийного ремонта.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничиваются общей продолжительностью 1 год с даты покупки массажного кресла.
5. Повреждения и неисправности кресла, вызванные неправильным использованием, обслуживанием и несанкционированным ремонтом не распространяются на гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не относящиеся к креслу.
7. Гарантия не распространяется на массажные кресла, сдаваемые в аренду, используемые для коммерческих целей, используемые в организациях или в других нежилых помещениях. В этом случае срок гарантии устанавливается и согласуется отдельно.
8. Все услуги, охватываемые настоящей гарантией должны быть одобрены компанией Релакса Стар и выполняться только уполномоченным техническим персоналом.
9. Если запасные части для ремонтируемых массажных кресел временно недоступны на складе, компания Релакса Стар оставляет за собой право вносить изменения в сроки ремонта или замены запасных частей по своему усмотрению.
Доказательство покупки (квитанция или кассовый чек) являются обязательными для всех гарантийных ремонтов.
10. Данное массажное кресло предназначено для использования на территории Российской Федерации и адаптировано под технические условия эксплуатации на данной территории. Использование этого кресла за пределами России может привести к потере гарантии.
11. Смягчение и деформация набивки подушек кресла и подголовника не является гарантийным случаем, так как эти элементы естественно смягчаются при использовании.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

12. Выцветание и износ обивки кресла не является дефектом в соответствии с настоящей Гарантией, так как эти элементы естественно изнашиваются при эксплуатации.
13. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате неправильного использования массажного кресла или злоупотребления массажем; несанкционированное использование любых аксессуаров; изменение конструкции кресла; неправильную установку кресла; несанкционированный ремонт; неправильное подключение массажного кресла к не рекомендуемому источнику питания; неисправность или повреждение электронной части кресла из-за неспособности обеспечить рекомендации производителя по техническому обслуживанию, транспортировку, кражу, пренебрежение рекомендациями, вандализм, или неправильные условия использования кресла или любые другие условия, которые находятся вне контроля производителя.
14. Ущерб, причиненный в результате транспортировки и разгрузки не является дефектом в соответствии с настоящей гарантией.
15. Производитель не несет ответственность в любом случае потери, повреждения или неудобства вызванного отказом массажного кресла.
16. Производитель не несет ответственность за случайный, косвенный или специальный ущерб.
17. Все подразумеваемые гарантии, включенные в данные ограничения, кроме случая коммерческого использования массажного кресла, ограничены общим сроком один год, начиная с даты покупки.
18. Исключительная ответственность компании производителя заключается в предоставлении бесплатного гарантийного ремонта и замены дефектной детали.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование	FUJIMO SYNERGY
Модель	F3005 FMZ
Тип	Массажное кресло реклайнер
Входное напряжение адаптера питания	~ 220 - 240 В, Частота 50 - 60 Гц
Выходное напряжение адаптера питания	--- 12 В, 42 Вт
Габаритные размеры упаковки	(Д x Ш x В) 95 x 85 x 70 см
Габариты в стандартном положении	(Д x Ш x В) 108 x 82 x 102 см
Габариты в разложенном положении 1	(Д x Ш x В) 150 x 82 x 93 см
Габариты в разложенном положении 2	(Д x Ш x В) 181 x 82 x 70 см
Ширина сиденья	(Д x Ш) 50 x 60 см
Минимальное расстояние от стены	25 см
Вес Брутто / Нетто	56 кг / 51 кг
Дата производства	_____ 202__ г.

Производитель: ООО РЕЛАКСА СТАР"
ИНН 5027211583
КПП 502701001



Юридический адрес: 140008 РФ, Московская область,
Люберецкий р-он, г. Люберцы, 3-е Почтовое отделение, д. 59А

Тел: 8-800-333-00-51

Сервисная служба: 140002, г. Люберцы, ул. Колхозная, 19А, пом. II.

Тел: 8-495-789-91-77 **e-mail:** service@relaxa.ru



SYNERGY

fujimo.ru